

# **PIANO PER IL MONITORAGGIO DELLA CIRCOLAZIONE DI SARS-COV-2 NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO**

## OBIETTIVI:



Coinvolgimento del personale TOSS per realizzare le attività di monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 in ambito scolastico tramite

- esecuzione di **test periodici** su una popolazione a campione di studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado (6-11 ANNI e 11-14 ANNI), classificate come “scuole sentinella”
- sarà utilizzato il **test molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 su campione salivare**. Questo permette di poter effettuare la raccolta in modo **autonomo** in **ambito familiare** e inoltre, garantisce la possibilità di processare il campione per l’eventuale sequenziamento genomico virale



# GESTIONE TAMPONI SALIVARI

- Ritiro dei tamponi salivari presso l'Istituto Scolastico ogni 15 gg
- Esecuzione del tampone a casa
- Conservazione in un sacchetto di plastica (es.alimenti)
- Consegna dei tamponi presso il referente Covid dell'Istituto Scolastico
- Raccolta dei tamponi in apposite buste suddivise per classi



- Eseguire la raccolta di saliva la **mattina, prima della colazione**
- Prima di iniziare, **lavarsi le mani** con acqua e sapone, sciacquarle e asciugarle o igienizzarle
- Aprire la provetta LolliSpongeTM tenendo il **dispositivo dal tappo**, inserirlo all'interno della bocca
- **Auto-Prelievo** di campioni di saliva
- **Muoverlo delicatamente all'interno della bocca (parte superiore della lingua e fra denti e guancia) per 60 secondi in modo da inumidire bene le spugne(NON MORDERE)**
- Riavvitare. Chiudere saldamente la provetta LolliSpongeTM.
- Restituire il dispositivo LolliSpongeTM secondo le istruzioni fornite separatamente.

# AVVERTENZE

1. **Il presente prodotto è ideato per un uso singolo; il suo riutilizzo può causare il rischio di infezioni e/o di risultati inattendibili**
2. Il dispositivo è pronto all'uso e non richiede alcuna fase di preparazione per il prelievo del campione.
3. Non adatto per qualsiasi altra applicazione che non sia il suo uso previsto.
4. Non riconfezionare.
5. **Durante il prelievo non forzare o premere eccessivamente Lollisponge; in caso contrario, il bastoncino potrebbe rompersi accidentalmente o staccarsi dal tappo.**
6. Non staccare il bastoncino con la spugna dal tappo.
7. **Non mordere le spugne.**
8. L'utilizzo del presente prodotto insieme a qualsiasi kit diagnostico rapido o con qualsiasi strumento diagnostico deve essere validato dall'utente prima dell'uso.
9. Non usare se:
  - **Lollisponge™ è visibilmente danneggiato (vale a dire se le spugne o il bastoncino del tampone sono rotti);**
  - **se la confezione o la provetta sono aperti;**
  - **se il dispositivo presenta segni di danneggiamento, deterioramento, contaminazione o se è stata superata la data di scadenza.**
10. Non toccare la spugna con le mani prima del prelievo.
11. Non sputare la saliva direttamente nel tubo.
12. La raccolta della saliva va effettuata almeno 30 minuti dopo aver mangiato, bevuto, fumato o lavato i denti.